

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR !

VERWARMEN in de magnetron / oven

Mini	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur *
	Oven	10 minuten op 100 graden
Midi	Magnetron	2 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur *
	Oven	20 minuten op 100 graden
Maxi	Magnetron	2 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur *
	Oven	20 minuten op 100 graden

- Bij magnetron met metalen rooster de pittenzak op een magnetronbestendig bord verwarmen.
- Bij magnetron zonder draaischijf de pittenzak na elke minuut opschudden om oververhitting te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen.
- Besprenkel de pittenzak af en toe voor het verwarmen met een klein beetje water tegen uitdrogen.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare hoes om de pittenzak blijven zitten.
- Wanneer de pittenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.

* Bij langer verwarmen of hogere wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal , uur in de vriezer voor juiste temperatuur voor coldpack.
- De pittenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussens de pittenzak eerst op kamertemperatuur komen voordat deze opgewarmd wordt.

BABY en BORSTVOEDING

- Gebruik bij borstvoeding zowel koud als warm.
- Zorg dat de pittenzak geen direct contact maakt met de blote huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron/oven kan de pittenzak nog iets warmer worden, wacht daarom 1 minuut voor gebruik, en controleer de temperatuur met de binnenkant van de pols of deze niet te warm is geworden.

AANDACHTSPUNTEN

- Bij magnetron met metalen rooster de pittenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen!
- De pittenzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.
- De buitenste hoes is wasbaar op graden.
- De binnen zak met de tarwe is niet wasbaar.
- De verwarmde pittenzak niet gebruiken bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- De pittenzak koel en droog bewaren en 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.

Penny's bags is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pittenzakken van Penny's bags.

GEBRUIKSAANWIJZING

Penny's bags pittenzak



Penny's bags

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR !